

## PATIENTE DE 59 ANS

- Présentant un ulcère localisé sur le gros orteil gauche évoluant depuis 12 mois.
- Présence du pouls pédieux et tibial (IPS=0.93)

## ANTÉCÉDENTS DU PATIENT

- Diabète de type 2
- Obésité
- Hypertension
- Cataracte
- Ulcère du pied droit

## PROTOCOLE DE SOINS

Mepilex® Border Flex

Carré

Mepilex® Border  
Flex CarréDécharge avec  
chaussures  
orthopédiquesRenouvellement  
tous les 7 jours

## EVOLUTION DE LA PLAIE

J1



- Plaie bourgeonnante mesurant 2,25 cm<sup>2</sup>
- Présence d'hyperkératose et de macération sur la peau périlésionnelle
- Absence de signes cliniques d'infection
- Niveau d'exsudat modéré

J14



- Plaie résiduelle mesurant 0,16 cm<sup>2</sup> (réduction de la surface de 92,9%)
- Amélioration de l'état de la peau périlésionnelle (diminution de la macération)
- Absence de signes cliniques d'infection
- Diminution du niveau d'exsudat

J21



- Plaie cicatrisée (100% épidermisation)
- Peau périlésionnelle saine et intacte

## SATISFACTION DES UTILISATEURS

- Le patient n'a pas présenté de douleur lors des renouvellements des pansements (EVA = 0 mm)
- Selon le soignant, Mepilex® Border Flex carré se conforme bien à la plaie, est facile à appliquer et a une bonne capacité à rester en place après la pose.

**Remerciements :** Photographies et notes aimablement fournies par Pr. Dr. José Luis Lázaro Martínez, Chef de l'unité pied diabétique, Université Complutense, Madrid, Espagne  
**Mepilex® Border Flex Carré :** \*Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires à absorption importante, adhésifs, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës et chroniques dès la phase de bourgeonnement, en traitement séquentiel.

Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation accompagnant les produits.

Mölnlycke Health Care, Mepilex sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales.

Ce document a été préparé par le Département Global Medical Affairs & Safety de Mölnlycke.

Remerciements : Photographies et notes aimablement fournies par Pr. Dr. José Luis Lázaro Martínez, Chef de l'unité pied diabétique, Université Complutense, Madrid, Espagne

© Copyright [2019] Mölnlycke Health Care.

Tous les produits mentionnés sont fabriqués en Europe. Dispositifs médicaux CE 0086. L'organisme notifié pour l'ensemble de ces produits est BSI (British Standards Institution).

Toutes les allégations cliniques des produits présentés proviennent de la notice d'utilisation et du dossier technique de marquage CE.

**Réclamation qualité produits : [reclamation.qualite@molnlycke.com](mailto:reclamation.qualite@molnlycke.com)**

Service clients & Renseignements produits :

Tel : 03 20 12 25 55 - Fax : 03 20 12 25 46

Distributeur : Mölnlycke Health Care

CS 70205 - 13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex

Fabricant : Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden

Tél : +46 31 722 30 00 - Fax : +46 31 722 34 01

[www.molnlycke.fr](http://www.molnlycke.fr)

