

Mepilex® Border Protect Sacrum



1. Zone à protéger.
Évaluez l'anatomie du patient pour déterminer le bon positionnement du pansement.



2. Après avoir séché et nettoyé soigneusement le pourtour de la plaie, retirez le feuillet protecteur au centre du pansement.



3. Ecartez les fesses puis appliquez le pansement sur la zone sacrée et sur le sillon interfessier.
Pour la prévention, placez la base du pansement pour couvrir la zone du coccyx. Pour le traitement, pour les plaies situées en bas du sacrum, il est possible d'appliquer le pansement dans l'autre sens.



4. Retirez les films protecteurs latéraux du sillon interfessier successivement puis lissez doucement le pansement de chaque côté du sillon.



5. Positionnement du pansement



6. Appuyez sur le pansement pour vous assurer qu'il soit entièrement au contact de la peau

Mepilex® Border Protect Sacrum : Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires anatomiques à absorption importante, adhésifs, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës et chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Mölnlycke, Mepilex et Safetac sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. Ces produits sont fabriqués en Europe. Dispositifs médicaux. L'organisme notifié de ces produits est BSI (British Standards Institution). CE 0086. Pour plus d'informations, veuillez-vous reporter à la notice d'utilisation accompagnant les produits.

Reclamations qualité produits : reclamation.qualite@molnlycke.com

Service clients & renseignements produits : Tél : 03 20 12 25 55 – Fax : 03 20 12 25 46
Distributeur : Mölnlycke Health Care – CS 70205 – 13 allée du Château Blanc – 59445 Wasquehal cedex
Fabricant : Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE6402 52 Göteborg, Sweden – Tél : +46 31 722 30 00 – Fax: +46 31 722 34

www.molnlycke.fr

©Copyright (2019) Mölnlycke Health Care


Mölnlycke®