

Guide de prise en charge des **PLAIES**

“Transfert Efficace,
Retrait Propre”

NOUVEAUTÉ



Edition **Mai 2021**




Mölnlycke®

OFFRE PANSEMENTS		TOUTES PLAIES	
		Bordés	Fibrés
PLAIES CHRONIQUES	Non bordés	●●● Toutes plaies chroniques exsudatives (ulcères, escarres, pied diabétique) ●●● Toutes plaies aiguës exsudatives, plaies chirurgicales, plaies traumatiques	●●● Plaies exsudatives ●●● Plaies chroniques ●●● Plaies cavitaires
		●●● Plaies très exsudatives (plus d'un changement de pansement par jour) ●●● Ulcères, Escarres	●●● Plaies chroniques et aiguës y compris plaies avec peau péri-lésionnelle fragile (ex : ulcères, dermabrasions, ...)
		●●● Escarres/Ulcères (talons et malléoles)	●●● Plaies peu exsudatives en phase d'épidermisation ●●● Plaies des extrémités ●●● Radiodermites ^{1,2}
		●●● Escarres sacrées ●●● Prévention des escarres sacrées ^{1-8, 10} ●●● Kystes pilonidaux	●●● Prévention des escarres talons/malléoles ⁹⁻¹⁰ ●●● Escarres/Ulcères (talons et malléoles)
		●●● Plaies chirurgicales suturées au bloc opératoire	
	Bordés	●●● Plaies chirurgicales ●●● Plaies traumatiques	
		●●● Protection des peaux lésées et/ou fragilisées ●●● Épidermolyse bulleuse ●●● Brûlures superficielles ●●● Dermabrasions et déchirures cutanées	
	Interfaces	●●● Brûlures superficielles ●●● Déchirures cutanées ●●● Dermabrasions ●●● Épidermolyse bulleuse (Mepitel uniquement)	

Mepilex® Border Flex Carré	
Mepilex® Border Flex Oval	
Exufiber® NOUVEAUTÉ	
Mextra® Superabsorbant	
Mepilex® XT Mepilex®	
Mepilex® Talon	
Mepilex® EM	
Mepilex® Border Protect Sacrum	
Mepilex® Border Protect Talon	
Mepilex® Border Post-Op	
Mepilex® Border Flex EM	
Mepilex® Transfer	
Mepitel® One Mepitel®	


Technologie Safetac®

- Gestion optimale des exsudats grâce au drainage vertical
- Minimise le risque de macération, scelle les berges de la plaie
- Maintien du milieu humide optimal


- Adhère sans coller
- Protège le tissu de cicatrisation
- N'arrache pas les cellules cutanées

- Enduction de silicone souple
- Epouse les reliefs de la peau
- Adhésion douce et sélective


Mode d'action

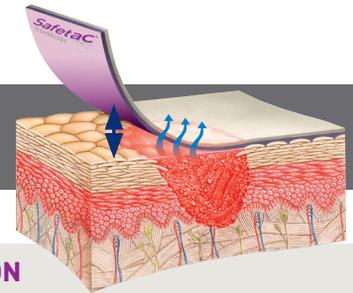

MOINS DE MACÉRATION

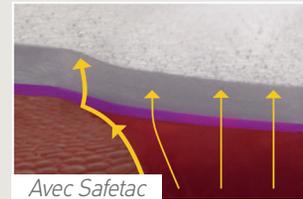

Avec Safetac

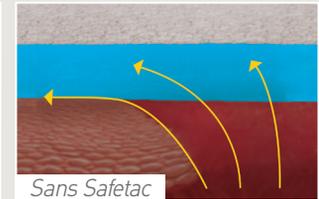


Sans Safetac

RETRAIT ATRAUMATIQUE



Avec Safetac

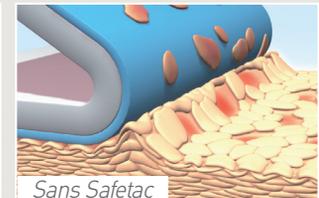

Sans Safetac



Avec Safetac



Sans Safetac

Technologie Hydrolock®



97%
de rétention

- ▶ Absorption des exsudats
- ▶ Rétention des exsudats
- ▶ Transfert des exsudats vers pansement secondaire
- ▶ Intégrité du pansement


Molnlycke HealthCare test EN 13726-1 - report n°18/5813/1

Pansements fibres NOUVEAUTÉ

Exufiber®

Pansement en fibres à haut pouvoir d'absorption

Fibres de PVA
(PolyVinylAlcool)
avec technologie
Hydrolock®

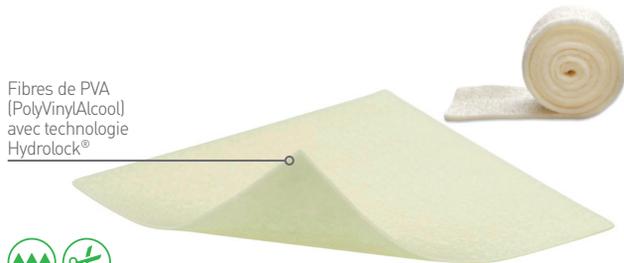

Indications - se référer à la notice d'utilisation

- Plaies exudatives
- Plaies chroniques (ulcères de jambe, plaies du pied diabétique, escarres)
- Plaies cavitaires



Escarre

Crédit photo : Mölnlycke



Ulcère veineux

Crédit photo : Mölnlycke



Ulcère du pied

Crédit photo : Mölnlycke



Propriétés

- Favorise la détersion autolytique
- Gestion des exsudats (absorption, rétention, transfert vers pansement secondaire)
- Intégrité (pas de résidus et retrait d'un seul tenant)
- Souple et découpable



Assortiment VILLE

REMBOURSÉ
LPPR*

Dim. totale (cm)	5 x 10	10 x 10	12 x 13	10 x 20	20 x 20	20 x 30	2,5 x 40	5 x 40
Pcs par boîte	16	16	16	16	10	10	16	16



Assortiment HÔPITAL

Dim. totale (cm)	5 x 10	10 x 10	12 x 13	10 x 20	20 x 20	20 x 30	2,5 x 40	5 x 40
Pcs par boîte	16	16	16	16	10	10	16	16

* LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables par la Sécurité Sociale.

Plus d'informations sur ce produit ►



Technologie Flex®



Flexible à 360°

- ▶ Améliore le confort**^{9,10}
- ▶ Minimise le risque de détachement¹¹
- ▶ Tient mieux en place
que les autres pansements***^{12,13}
- ▶ Réduit les tensions sur la peau**^{9,10}

* Comparé à Aquacel Foam, Aquacel Foam Pro, UrgoTul Border, UrgoStart Border, UrgoStart Plus Border, Absofoam Border, Absofoam Border Flex, Biatain Silicone, Tegaderm Foam Border et Suprasorb P Sensitive

** vs Allevyn Life et Aquacel Foam

*** sur les genoux et les coudes par rapport à d'autres pansements de forme carrée


Pansements bordés flexibles

Mepilex® Border Post-Op

Pansement siliconé bordé flexible Usage bloc opératoire

Film externe en polyuréthane transparent semi-perméable

Coussin en fibres de polyacrylate super-absorbantes avec la Technologie Flex

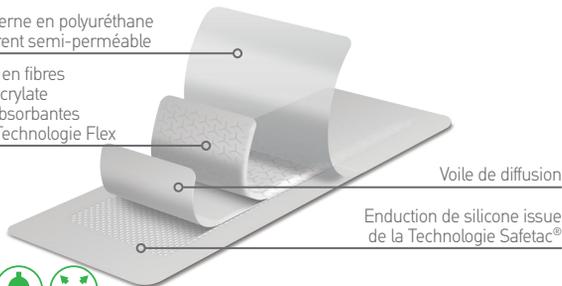

Voile de diffusion

Enduction de silicone issue de la Technologie Safetac®



Indications - se référer à la notice d'utilisation

■ Plaies chirurgicales suturées au bloc opératoire



Plaie post-chirurgicale

Crédit photo :
Chabrol S.,
IDEL



Plaie post-chirurgicale

Crédit photo :
Ledemey C.,
IDEL



Plaie post-chirurgicale

Crédit photo :
Vecqueau F.,
IDEL

* vs AllewynLife et Aquacel Foam, sur les genoux et les coudes par rapport à d'autres pansements de forme carrée.



Propriétés

- Favorise la mobilité précoce des patients^{*1-5}
- Offre une capacité d'absorption élevée du sang⁶
- Limite la formation de phlyctènes^{7,8}



Assortiment VILLE

- Pansements non remboursés LPPR. Non disponible en ville



Assortiment Hôpital

Dim. totale (cm)	6 x 8	9 x 10	10 x 15	10 x 20	10 x 25	10 x 30	10 x 35
Dim. compresse (cm)	3 x 5	5 x 6	5 x 10	5 x 15	5 x 20	5 x 25	5 x 30
Pcs par boîte	10	10	10	10	10	10	5

Mepiform®

- Traitement des cicatrices hypertrophiques et/ou chéloïdes récentes ou anciennes.
- Traitement prophylactique des plaies fermées pour prévenir la formation de cicatrices hypertrophiques et/ou chéloïdes.

Pour plus d'informations, voir la notice d'utilisation.

Mepilex® Border Flex

Carré

Pansement hydrocellulaire siliconé bordé flexible, forme Carré

Film externe semi-perméable en polyuréthane

Voile de diffusion en non-tissé avec Technologie Flex 360°



Couche de rétention renforcée en fibres de polyacrylate avec Technologie Flex 360°

Couche d'absorption en mousse de polyuréthane

Enduction de silicone issue de la Technologie Safetac®



Indications - se référer à la notice d'utilisation

Traitement des plaies exsudatives :

- Plaies chroniques : escarres, ulcères de jambes, plaies du pied diabétique
- Plaies aiguës : plaies chirurgicales et traumatiques



Plaie traumatique

Crédit photo : Fradin G, IDEL



Ulcère Mixte

Crédit photo : Boixados D, IDEL



Ulcère du pied diabétique neuropathique

Crédit photo : Lázaro Martínez J.L, Professeur Docteur

* Comparé à Aquacel Foam, Aquacel Foam Pro, UrgoTul Border, UrgoStart Border, UrgoStart Plus Border, Absofoam Border, Absofoam Border Flex et Tegaderm Silicone Border.*** Comparé à Allewyn Gentle Border, Allewyn Life, Aquacel Foam, Aquacel Foam Pro, UrgoTul Border, UrgoStart Border, UrgoStart Plus Border, Absofoam Border, Absofoam Border Flex et Tegaderm Silicone Border



Propriétés

- Conformabilité** 1-7,15 et tenue en place
- Gestion optimale***2-4,6-8,15 et optimisée des exsudats9-11
- Moins de douleurs12 et de traumatismes13-14



Assortiment VILLE

REMBOURSÉ LPPR*

Dim. totale (cm)	7,5 x 8,5	10 x 10	14 x 15	17,5 x 17,5	17,5 x 23
Dim. compresse (cm)	4,5 x 4,5	6,5 x 6,5	10 x 11	11 x 11	11 x 16
Pcs par boîte	16	16	16	10	10



Assortiment HÔPITAL

Dim. totale (cm)	7,5 x 8,5	10 x 10	12,5 x 12,5	14 x 15	17,5 x 17,5	17,5 x 23
Dim. compresse (cm)	4,5 x 4,5	6,5 x 6,5	8,5 x 8,5	10 x 11	11 x 11	11 x 16
Pcs par boîte	16	16	5	16	10	10

* LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables par la Sécurité Sociale.

Plus d'informations sur ce produit ➔



Mepilex® Border Flex

Oval

Pansement hydrocellulaire siliconé bordé flexible, forme Ovale

Film externe semi-perméable en polyuréthane

Voile de diffusion en non-tissé avec Technologie Flex 360°



Couche de rétention renforcée en fibres de polyacrylate avec Technologie Flex 360°

Couche d'absorption en mousse de polyuréthane

Enduction de silicone issue de la Technologie Safetac®



Indications - se référer à la notice d'utilisation

Traitement des plaies exsudatives :

- Plaies chroniques : escarres, ulcères de jambes, plaies du pied diabétique
- Plaies aiguës : plaies chirurgicales et traumatiques



Plaie traumatique

Crédit photo : Fradin G, IDEL



Ulcère Mixte

Crédit photo : Boixados D, IDEL



Ulcère du pied diabétique neuropathique

Crédit photo : Lázaro Martínez J.L, Professeur Docteur

** Comparé à Aquacel Foam, Aquacel Foam Pro, UrgoTul Border, UrgoStart Border, UrgoStart Plus Border, Absofoam Border, Absofoam Border Flex et Tegaderm Silicone Border.*** Comparé à Allewyn Gentle Border, Allewyn Life, Aquacel Foam, Aquacel Foam Pro, UrgoTul Border, UrgoStart Border, UrgoStart Plus Border, Absofoam Border, Absofoam Border Flex et Tegaderm Silicone Border



Propriétés

- Conformabilité** 1-7,15 et tenue en place
- Gestion optimale***2-4,6-8,15 et optimisée des exsudats⁹⁻¹¹
- Moins de douleurs¹² et de traumatismes¹³⁻¹⁴



Assortiment VILLE

REMBOURSÉ
LPPR

Dim. totale (cm)	7,5 x 9,5	10 x 12,5	13,5 x 16,5	16 x 20
Dim. compresse (cm)	3,5 x 5,5	6,2 x 8,5	9 x 12	11 x 15,4
Pcs par boîte	16	16	16	10



Assortiment HÔPITAL

Dim. totale (cm)	7,5 x 9,5	10 x 12,5	13,5 x 16,5	16 x 20
Dim. compresse (cm)	3,5 x 5,5	6,2 x 8,5	9 x 12	11 x 15,4
Pcs par boîte	16	16	16	10


* LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables par la Sécurité Sociale.

Plus d'informations sur ce produit ➔



Mepilex® Border Flex EM

Pansement hydrocellulaire siliconé bordé flexible, forme rectangle

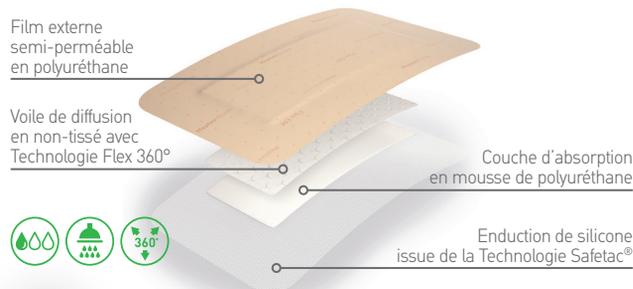

Indications - se référer à la notice d'utilisation

Traitement des plaies pas à peu exsudatives :

- Plaies chirurgicales
- Plaies traumatiques



Plaie traumatique
Crédit photo :
P. Blanc-Martin,
IDEL



Plaie post opératoire
Crédit photo :
C. Ledemenev,
IDEL



Plaie post opératoire
Crédit photo :
S. Chabrol,
IDEL

** vs AlleynLife et Aquacel Foam, sur les genoux et les coudes par rapport à d'autres pansements de forme carrée.

*** Assortiment Mepilex® Border EM disponible à la fin du guide.



Propriétés

- Favorise la mobilité précoce du patient**1-5
- Protège la peau et la suture des agressions extérieures
- Offre un retrait atraumatique6,7 et indolore8



Assortiment VILLE

REMBOURSE LPPR*	Mepilex® Border Flex					
	5 x 5	6 x 12	9 x 15	10 x 20	10 x 25	10 x 30
Dim. totale (cm)	5 x 5	6 x 12	9 x 15	10 x 20	10 x 25	10 x 30
Dim. compresse (cm)	3 x 3	3 x 8	4,5 x 10	5 x 15	5 x 20	5 x 25
Pcs par boîte	10	10	10	10	10	10



Assortiment Hôpital***

H	Mepilex® Border Flex					
	5 x 5	6 x 12	9 x 15	10 x 20	10 x 25	10 x 30
Dim. totale (cm)	5 x 5	6 x 12	9 x 15	10 x 20	10 x 25	10 x 30
Dim. compresse (cm)	3 x 3	3 x 8	4,5 x 10	5 x 15	5 x 20	5 x 25
Pcs par boîte	10	10	10	10	10	10

* LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables par la Sécurité Sociale.

Plus d'informations sur ce produit ➔



Technologie Deep Defense* et Structure multicouche



EN MOYENNE
83%

de **réduction du risque relatif** de survenue d'escarres [73-100]¹⁻¹⁰




- ▶ **Prévention** de l'aggravation des escarres installées ¹²
- ▶ **Réduction de 90 à 100%** ¹¹ de la pression et du cisaillement
- ▶ **Réduction du risque d'escarres par 5** ¹⁻¹⁰

* Deep Defense = Protection des tissus mous

Pansements bordés zones anatomiques

Mepilex® Border Protect Sacrum

Pansement hydrocellulaire siliconé bordé,
forme Sacrum

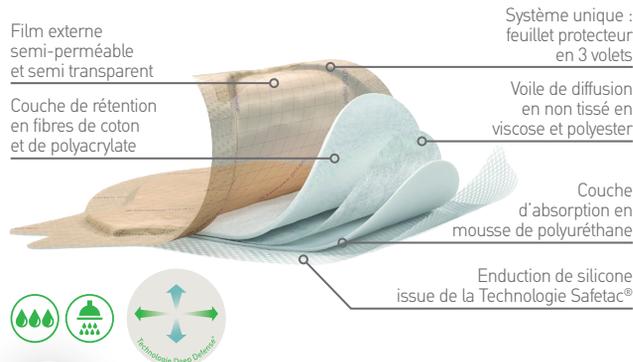

Indications - se référer à la notice d'utilisation

- Prévention des escarres sacrées** 1-8;10
- Traitement des plaies exsudatives du sacrum (escarres sacrées, kystes pilonidaux)



Escarre sacrée

Crédit photo : Piens B., IDEL



Kyste pilonidal

Crédit photo : Gautier N., IDEL

** Non remboursé LPPR

Propriétés

- Protection des tissus mous grâce à une résistance du pansement dans le sens de la hauteur et une souplesse dans le sens de la largeur (Technologie Deep Defense)
- Capacité élevée d'absorption et de rétention
- Bordure renforcée pour éviter que la bordure ne roule en cas de friction
- Retrait et positionnement facilités grâce aux ailettes de préhension

Assortiment VILLE

REMBOURSÉ
LPPR*

Dim. totale (cm)

16 x 20

22 x 25

Pcs par boîte

10

10

Assortiment HÔPITAL

Dim. totale (cm)

16 x 20

22 x 25

20 x 20

Pcs par boîte

10

10

10

Arrêt de commercialisation décembre 2021

* LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables par la Sécurité Sociale.


Plus d'informations sur ce produit



Mepilex® Border Protect

Talon

Pansement hydrocellulaire siliconé bordé, forme Talon

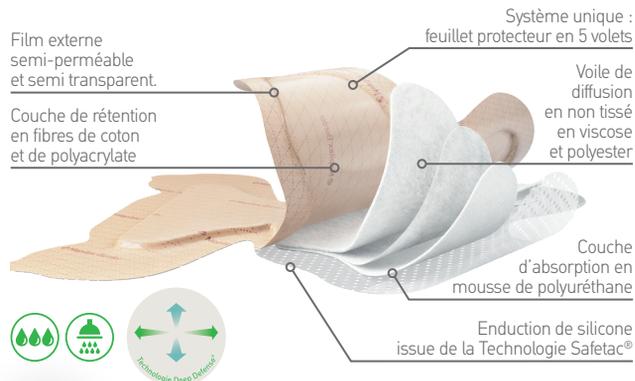

Indications - se référer à la notice d'utilisation

- Prévention des escarres du talon** 9-10
- Traitement des plaies exsudatives du talon (escarres, ulcères)



Escarre du talon
Crédit photo :
Amar Youcef, J.,
IDEL



Ulcère
Crédit photo :
Karraoula F.,
IDEL

** Non remboursé LPPR



Propriétés

- Protection des tissus mous grâce à une résistance du pansement dans le sens de la hauteur et une conformabilité dans le sens de la largeur (Technologie Deep Defense)
- Capacité élevée d'absorption et de rétention
- Bordure renforcée pour éviter que la bordure ne roule en cas de friction
- Retrait et positionnement facilités grâce aux ailettes de préhension



Assortiment VILLE

REMBOURSÉ
LPPR*



Dim. totale (cm)

22 x 23

Pcs par boîte

10



Assortiment HÔPITAL



Dim. totale (cm)

22 x 23

Pcs par boîte

10

* LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables par la Sécurité Sociale.

Plus d'informations sur ce produit ▶



Pansements non bordés

Pansements
non bordés

Pansement hydrocellulaire absorbant

Mousse de polyuréthane
fine et absorbante



Enduction
de silicone issue
de la technologie
Safetac®



Fixation
recommandée**



Indications - se référer à la notice d'utilisation

- Protection des peaux lésées et/ou fragilisées
- Epidermolyse bulleuse
- Brûlures superficielles
- Dermabrasions et déchirures cutanées



Plaie traumatique

Crédit photo : Bandelier L.



Dermabrasion

Crédit photo :
Bouche P., Dr.



Plaie traumatique

Crédit photo :
Doassans A., IDEL

** Fixation recommandée : Tubifast® 2 Way Stretch® ou Mepitel® Film.



Propriétés

- Sans film externe il est non occlusif, permettant entre autre le transfert des exsudats dans le pansement secondaire
- Extrêmement souple et confortable
- Non adhérence à la plaie, adhérence douce sur le pourtour



Assortiment VILLE

REMBOURSÉ
LPPR*



Dim. totale
(cm)

7,5 x 8,5

14 x 15

17,5 x 17,5

Pcs par
boîte

10

10

10



Assortiment HÔPITAL



Dim. totale
(cm)

7,5 x 8,5

12,5 x 12,5

17,5 x 17,5

Pcs par
boîte

10

16

10

* LPPR : Liste des Produits et Prestations
Remboursables par la Sécurité Sociale.


Mepilex® EM

Pansement hydrocellulaire siliconé non bordé Forme mince

Film de polyuréthane semi-perméable étiré

Mousse absorbante extra fine en polyuréthane.

Enduction de silicone issue de la technologie Safetac®

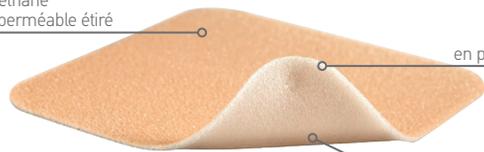

Fixation recommandée**



Indications - se référer à la notice d'utilisation

Plaies peu exsudatives en phase d'épidermisation

- Plaies des extrémités
- Radiodermites^{1,2}
- Protection de la peau fragile des forces externes sous dispositifs médicaux^{3,4}



Plaies extrémités

Crédit photo : Mölnlycke



Radiodermites

Crédit photo : Mölnlycke

** Fixation recommandée : Tubifast® 2 Way Stretch® ou Mepitel® Film.



Propriétés

- Très fin et conformable: idéal sur plaies d'extrémités.
- Tenue du pansement lors de la pose et de la fixation : pas besoin de 3^{ème} main
- Ne laisse aucun résidu dans la plaie



Assortiment VILLE

REMBOURSÉ LPPR*			
Dim. totale (cm)	7,5 x 8,5	14 x 15	17,5 x 17,5
Pcs par boîte	10	10	10




Assortiment HÔPITAL

Dim. totale (cm)	7,5 x 8,5	12,5 x 12,5	17,5 x 17,5
Pcs par boîte	10	10	10

* LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables par la Sécurité Sociale.

Mepilex® XT

Pansement hydrocellulaire siliconé non bordé avec canaux de drainage

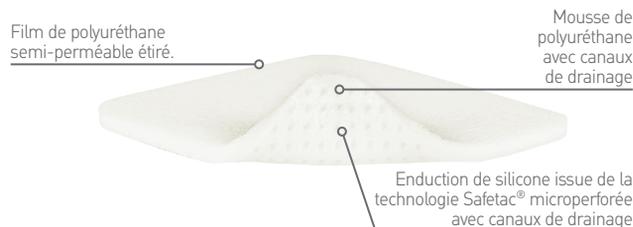

Indications - se référer à la notice d'utilisation

- Plaies chroniques et aiguës
- Y compris plaies avec peau périlésionnelle fragile (ex : ulcères, dermabrasions, déchirure cutanée...)



Ulcère veineux

Crédit photo : M. Wiser



Déchirure cutanée

Crédit photo : C. Dubos

** Fixation recommandée : Tubifast® 2 Way Stretch®.



Propriétés

- Micro-adhérence : adhésion douce sur la peau périlésionnelle.
- Ne laisse pas de résidus dans la plaie
- Absorption de tous types d'exsudats (fluides ou épais)^{1,2,3}



Assortiment VILLE

REMBOURSÉ
LPPR*

Dim. totale (cm)	14 x 15	10 x 21	17,5 x 17,5	21 x 22
Pcs par boîte	16	16	10	10



Assortiment HÔPITAL


Dim. totale (cm)	12,5 x 12,5	10 x 21	17,5 x 17,5	21 x 22
Pcs par boîte	5	5	5	5

* LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables par la Sécurité Sociale.

Plus d'informations sur ce produit ▶



Pansement hydrocellulaire siliconé non bordé

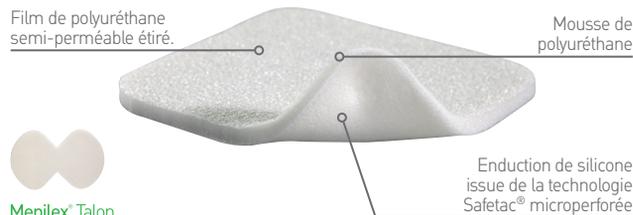

Mepilex® Talon



Fixation recommandée**



Indications - se référer à la notice d'utilisation

- Plaies chroniques et aiguës
- Y compris plaies avec peau périlésionnelle fragile (ex : ulcères, dermabrasions, ...)



Ulcère

Crédit photo : Mölnlycke



Ulcère du pied diabétique

Crédit photo : Mölnlycke

* LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables par la Sécurité Sociale.



Propriétés

- Micro-adhérence : adhésion douce sur la peau périlésionnelle
- Ne laisse pas de résidus dans la plaie
- Tenue du pansement lors de la pose et de la fixation (pas besoin de 3^{ème} main)



Assortiment VILLE

- Produit Mepilex® non disponible à la ville



Mepilex® Talon



Dim. totale (cm)	13 x 21	15 x 22
Pcs par boîte	10	10



Assortiment HÔPITAL

Dim. totale (cm)	5 x 5	10 x 10	12,5 x 12,5	10 x 21	15 x 15	17,5 x 17,5	21 x 22
Pcs par boîte	5	5	5	5	5	5	5


Mepilex® Talon



Dim. totale (cm)	13 x 21	15 x 22
Pcs par boîte	10	10

Mextra® Superabsorbant

Pansement hydrocellulaire superabsorbant non adhésif

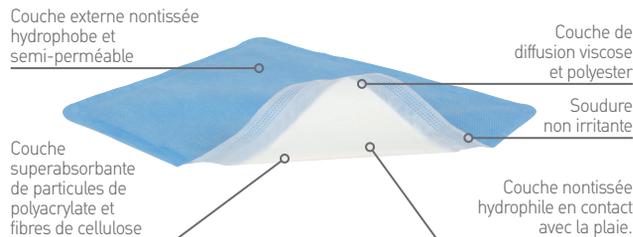

Indications - se référer à la notice d'utilisation

Plaies très exsudatives

- Plus d'un changement de pansement absorbant standard par jour
- Ulcères, escarres, ...



Lymphoedème

Crédit photo : Mölnlycke



Ulcère veineux

Crédit photo : Mölnlycke

** Fixation recommandée : Tubifast® 2 Way Stretch® ou Mepitel® Film.



Propriétés

- Capacité d'absorption et de rétention des exsudats très élevée
- Intégrité maintenue même au retrait
- Gonfle peu à l'absorption



Assortiment VILLE

REMBOURSÉ LPPR*					
Dim. totale (cm)	12,5 x 12,5	12,5 x 22,5	17,5 x 22,5	22,5 x 27,5	22,5 x 42,5
Pcs par boîte	10	10	10	10	10



Assortiment HÔPITAL

Dim. totale (cm)	10 x 10	10 x 20	15 x 20	20 x 30	20 x 40
Pcs par boîte	10	10	10	10	10

* LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables par la Sécurité Sociale.

Plus d'informations sur ce produit ➔



Interfaces

Mepitel® One

Interface transparente siliconée d'un seul côté

Trame à mailles étroites de polyuréthane transparente et fine

Enduction de silicone issue de la technologie Safetac® sur 1 côté

Système unique feuillet protecteur 2 volets



Fixation recommandée**




ou



Indications - se référer à la notice d'utilisation

- Brûlures superficielles
- Dermabrasions, déchirures cutanées

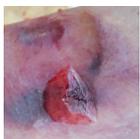

Déchirure cutanée
Crédit photo : Karraoula F., IDEL



Dermabrasion
Crédit photo : Fouquet J., IDEL

** Fixation recommandée : Tubifast® 2 Way Stretch® ou Mepitel® Film.



Propriétés

- Simple et facile à poser, grâce au feuillet protecteur 2 volets
- Transparent : permet l'observation de la plaie sans avoir à retirer l'interface
- Retrait atraumatique et indolore¹



Assortiment VILLE

REMBOURSÉ LPPR*				
Dim. totale (cm)	5 x 7,5	7,5 x 10	10 x 18	24 x 27,5
Pcs par boîte	10	10	10	5



Assortiment Hôpital

Dim. totale (cm)	5 x 7,5	7,5 x 10	10 x 18	24 x 27,5
Pcs par boîte	10	10	10	5

* LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables par la Sécurité Sociale.

Plus d'informations sur ce produit ➔



Interface siliconée des deux côtés



Fixation recommandée**



Indications - se référer à la notice d'utilisation

- Epidermolyse bulleuse
- Brûlures superficielles
- Dermabrasions, déchirures cutanées



Brûlure superficielle
Crédit photo : Mölnlycke



Dermabrasion
Crédit photo : Frezouls J-C., IDEL

** Fixation recommandée : Tubifast® 2 Way Stretch® ou Mepitel® Film.



Propriétés

- Non adhérence à la plaie, retrait atraumatique et indolore
- Réduction du risque de macération en évitant les fuites latérales d'exsudats
- Intégrité optimale, pas de résidus au retrait¹



Assortiment VILLE

	5 x 7,5	7,5 x 10	10 x 18	20 x 31
REMBOURSÉ LPPR*				
Dim. totale (cm)	5 x 7,5	7,5 x 10	10 x 18	20 x 31
Pcs par boîte	10	10	10	5



Assortiment Hôpital

	5 x 7,5	7,5 x 10	10 x 18	20 x 31
Dim. totale (cm)	5 x 7,5	7,5 x 10	10 x 18	20 x 31
Pcs par boîte	10	10	10	5

* LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables par la Sécurité Sociale.

Fixation / Protection


Mepitel® Film

Film siliconé transparent semi-perméable

Film de polyuréthane transparent très fin

Bord cadre et feuillet de protection

Enduction de silicone issue de la technologie Safetac®

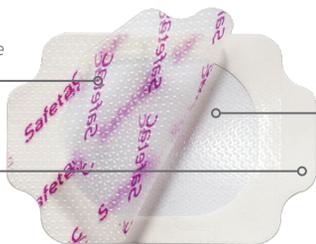

Indications - se référer à la notice d'utilisation

- Fixation de pansements et protection des peaux fragiles
- Pansement secondaire au dessus de crèmes, pommades et gels
- Prévention des réactions cutanées radio-induites**



Fixation

Crédit photo : Mölnlycke



Protection sous bandes adhésives

Crédit photo : Mölnlycke



Prévention

Crédit photo : Mölnlycke

** Non-remboursé LPPR



Propriétés

- Transparent siliconé, ultra fin
- Imperméable : permet la douche
- Retrait atraumatique et indolore



Assortiment VILLE

REMBOURSÉ
LPPR*



Dim. totale (cm)

10,5 x 12

10,5 x 25

15,5 x 20

Pcs par boîte

10

10

10



Assortiment HÔPITAL



Dim. totale (cm)

6 x 7

10 x 12

10 x 25

15 x 20

Pcs par boîte

10


10

10

10

* LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables par la Sécurité Sociale.

Bandage tubulaire en jersey, extensible en longueur et en largeur

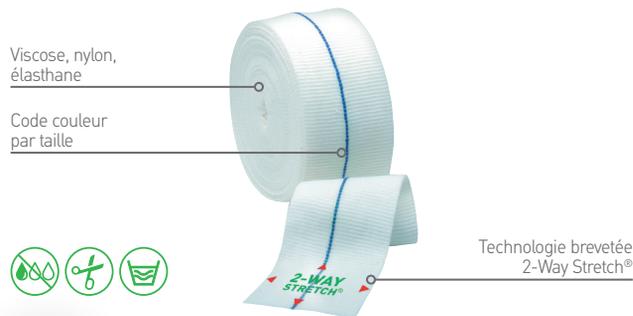

Indications - se référer à la notice d'utilisation

- Fixation de pansements
- Protection cutanée (sous plâtre ou bande de contention)
- Technique de l'enveloppement humide (dermatite atopique)



Crédit photo : Mölnlycke



Crédit photo : Mölnlycke



Crédit photo : Mölnlycke

NR : Non remboursé LPPR. Existe en rouleau de 10 m à l'hôpital.



Propriétés

- Extensible en longueur et en largeur
- Liberté totale de mouvements
- Fixation sécurisée sans compression ni effet garrot
- Lavable



Assortiment VILLE



Code couleur	ligne rouge ^{NR}	ligne verte ^{NR}	ligne bleue	ligne jaune	ligne violette
Circonférence (cm) ↔	9-18	14-24	24-40	35-64	64-130
Longueur (m)	1	1	10	10	10



Assortiment HÔPITAL



Code couleur	ligne rouge	ligne verte	ligne bleue	ligne jaune	ligne violette
Circonférence (cm) ↔	9-18	14-24	24-40	35-64	64-130
Longueur (m)	10	10	10	10	10

* LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables par la Sécurité Sociale.

Conseils de découpes et de poses

ZONE TETE/COU/TORSE

ZONE MEMBRE SUPERIEUR

ZONE MEMBRE INFERIEUR

- Découpez les pansements avant de retirer les feuillets de protection, pour empêcher le pansement de coller aux ciseaux.
- En cas de découpe des pansements Mepilex® Border Flex Carré, Mepilex® Border Flex Oval, Mepilex® Border Flex EM, Mepilex® Border Protect Sacrum, Mepilex® Border Protect Talon l'étanchéité n'est pas garantie.
- Fixez Mepilex® XT, Mepilex®, Mepilex® Talon et Mepilex® EM avec un système de maintien tel que Tubifast® 2-Way Stretch®.
- Fixez Mepilex® Transfer, Mepitel®, Mepitel® One et Mextra® Superabsorbant avec Tubifast® 2-Way Stretch® ou un film adhésif tel que Mepitel® Film.
- Fixez / couvrez Exufiber® avec un film tel que Mepitel® Film ou avec un pansement secondaire de type Mepilex® Border Flex Carré, Oval ou Mepilex® Border Protect Sacrum/Talon.

ZONE TÊTE/COU/TORSE



Cou



Mepilex® Border Flex Oval



Mepilex® Border Flex Oval



Mepilex® EM



Mepilex® Transfer

Tête



Mepilex® XT



Tubifast® 2-Way Stretch®

ZONE TÊTE/COU/TORSE



Torse



Mepilex® Border Flex Carré



Mepilex® Border Flex



Mepilex® EM



Mepitel® Film

Poitrine



Mepilex® Border Flex Carré

ZONE MEMBRE SUPERIEUR



Coude face posterieur



Mepilex® Border Flex Oval



Mepilex® Border Flex Carré

Coude face anterieur



Mepilex® Border Flex Oval



Mepilex® Border Flex Carré

Creux axillaire



Mepilex® Border Flex Carré



Mepilex® XT

ZONE MEMBRE SUPERIEUR



Doigt



Mepilex® Border Flex Oval



Mepilex® Border Flex Carré

Main



Mepilex® XT



Tubifast® 2-Way Stretch®



Mepilex® Transfer

ZONE MEMBRE SUPERIEUR



Poignet



Mepilex® Border Flex Oval



Mepilex® Border Flex Carré



Mepilex® Border Flex

Bras



Mepilex® XT



Tubifast® 2-Way Stretch®

ZONE MEMBRE SUPERIEUR



Bras (suite)



Mepitel® One

Epaule



Mepilex® Border Flex Oval



Mepilex® Border Flex Carré

ZONE MEMBRE INFERIEUR



Genou



Mepilex® Border Flex Carré



Mepilex® Border Flex

Hanche



Mepilex® Border Flex

Jambe



Mextra® Superabsorbant



Mepilex® XT

ZONE MEMBRE INFERIEUR



Jambe (suite)



Tubifast® 2-Way Stretch®



Mepitel® One

Malleole



Mepilex® Border Flex Oval



Mepilex® Border Flex Carré



Mepilex® Border Protect
Talon



Mepilex® Talon

ZONE MEMBRE INFERIEUR



Pied



Mepilex® Border Flex Carré



Mepilex® Border Flex Carré



Mepilex® Border Flex Oval



Mepilex® EM



Exufiber®

ZONE MEMBRE INFERIEUR



Orteil



Mepilex®




Tubifast® 2-Way Stretch®

Partie inférieure de l'abdomen



Mepilex® Border Flex

Sacrum

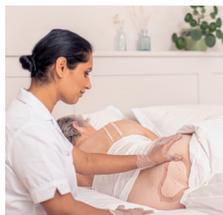

Mepilex® Border Protect
Sacrum



Exufiber® et Mepilex® Border Protect
Sacrum



Talon



Mepilex® Border Protect
Talon



Mepilex® Border Protect
Talon



Mepilex® Border Protect
Talon



Mepilex® Border Protect
Talon

Assortiments
VILLE & HÔPITAL

Assortiment VILLE

Pansements fibres

Exufiber®

Pansement en fibres
à haut pouvoir d'absorption



Code ACL 13	Dimension totale (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
7323 190 273 690	5 x 10	16	64
7323 190 213 764	10 x 10	16	64
7323 190 273 706	12 x 13	16	64
732 3190 273 713	10 x 20	16	64
7323 190 273 720	20 x 20	10	40
7323 190 213 795	20 x 30	10	40
7323 190 273 737	2,5 x 40	16	64
7323 190 273 744	5 x 40	16	64

Pansements bordés flexibles

Mepilex® Border Flex Carré

Pansement hydrocellulaire siliconé bordé flexible,
forme Carrée



Code ACL 13	Dimension totale (cm)	Dimension compressé (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
7323 190 196 562	7,5 x 8,5	4,5 x 4,5	16	96
7323 190 250 561	10 x 10	6,5 x 6,5	16	96
7323 190 196 555	14 x 15	10 x 11	16	96
7323 190 196 579	17,5 x 17,5	11 x 11	10	50
7323 190 196 586	17,5 x 23	11 x 16	10	50

Pansements bordés flexibles

Mepilex® Border Flex Oval

Pansement hydrocellulaire siliconé bordé flexible,
forme Ovale



Code ACL 13	Dimension totale (cm)	Dimension compressé (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
7323 190 220 489	7,5 x 9,5	3,5 x 5,5	16	64
7323 190 220 496	10 x 12,5	6,2 x 8,5	16	64
7323 190 220 465	13,5 x 16,5	9 x 12	16	32
7323 190 220 472	16 x 20	11 x 15,4	10	50

Mepilex® Border Flex EM

Pansement hydrocellulaire siliconé bordé flexible,
forme rectangle



Code ACL 13	Dimension totale (cm)	Dimension compressé (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
7323 190 234 646	5 x 5	3 x 3	10	70
7323 190 234 653	6 x 12	3 x 8	10	50
7323 190 234 660	9 x 15	4,5 x 10	10	70
7323 190 234 677	10 x 20	5 x 15	10	50
7323 190 204 922	10 x 25 Mepilex® Border Flex	5 x 20	10	60
7323 190 204 939	10 x 30 Mepilex® Border Flex	5 x 25	10	40

Pansements bordés anatomiques

Mepilex® Border Protect Sacrum

Pansement hydrocellulaire siliconé bordé
forme Sacrum



Code ACL 13	Dimension totale (cm)	Dimension compresse (cm²)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
7323 190 244 676	16 x 20	120	10	50
7323 190 218 189	22 x 25	240	10	30

Mepilex® Border Protect Talon

Pansement hydrocellulaire siliconé bordé
forme Talon



Code ACL 13	Dimension totale (cm)	Dimension compresse (cm²)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
7323 190 218 196	22 x 23	189	10	30

Pansements non bordés

Mepilex® Transfer

Pansement hydrocellulaire absorbant

Fixation
recommandée**



Code ACL 13	Dimension totale (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
7323 190 180 769	7,5 x 8,5	10	140
7323 190 180 776	14 x 15	10	70
7332 430 872 128	17,5 x 17,5	10	50

Pansements non bordés

Mepilex® EM

Pansement hydrocellulaire siliconé
non bordé, forme mince

Fixation
recommandée**



Code ACL 13	Dimension totale (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
7323 190 180 745	7,5 x 8,5	10	140
7323 190 180 752	14 x 15	10	70
7332 430 666 642	17,5 x 17,5	10	50

Mepilex® XT

Pansement hydrocellulaire siliconé
non bordé avec canaux de drainage

Fixation
recommandée**



Code ACL 13	Dimension totale (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
7323 190 123 582	14 x 15	16	48
7323 190 123 551	10 x 21	16	64
7323 190 123 568	17,5 x 17,5	10	60
7323 190 123 575	21 x 22	10	70

Mepilex® Talon

Pansement hydrocellulaire siliconé non bordé,
forme Talon

Fixation
recommandée**



Code ACL 13	Dimension totale (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
7332 430 727 572	13 x 21	10	40
7332 551 617 998	15 x 22	10	20

Pansements non bordés

Mextra® Superabsorbant

Pansement hydrocellulaire superabsorbant non adhésif

Fixation recommandée**



Code ACL 13	Dimension totale (cm)	Dimension compressée (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
7323 190 180 783	12,5 x 12,5	9,5 x 9,5	10	50
7323 190 224 654	12,5 x 22,5	9,5 x 19,5	10	90
7323 190 098 187	17,5 x 22,5	14,5 x 19,5	10	40
7323 190 098 163	22,5 x 27,5	19,5 x 24,5	10	40
7323 190 224 708	22,5 x 42,5	19,5 x 39,5	10	50

Interfaces

Mepitel® One

Interface transparente siliconée d'un seul côté

Fixation recommandée**



Code ACL 13	Dimension totale (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
7332 551 023 720	5 x 7,5	10	70
7332 551 023 744	7,5 x 10	10	40
7332 551 023 768	10 x 18	10	70
7332 551 225 650	24 x 27,5	5	30

Interfaces (suite)

Mepitel®

Interface siliconée des deux côtés

Fixation recommandée**



Code ACL 13	Dimension totale (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
7310 792 905 104	5 x 7,5	10	50
7310 792 907 108	7,5 x 10	10	40
7310 792 910 108	10 x 18	10	70
7332 430 485 557	20 x 31	5	30

Fixation/Protection

Tubifast® 2-Way Stretch®

Bandage tubulaire en jersey, extensible en longueur et en largeur



Code Laboratoire	Code couleur	Circonférence (cm)	Longueur (m)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
5055 158 008 403	ligne rouge ^{NR}	9-18	1	12	36
5055 158 008 441	ligne verte ^{NR}	14-24	1	12	36
3401 095 379 021	ligne bleue	24-40	10	1	30
3401 095 379 199	ligne jaune	35-64	10	1	12
3401 095 379 250	ligne violette	64-130	10	1	15

Mepitel® Film

Film siliconé transparent semi-perméable



Code ACL 13	Dimension totale (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
7332 551 974 367	10,5 x 12	10	70
7332 551 974 381	10,5 x 25	10	50
7332 551 974 404	15,5 x 20	10	70

Assortiment HÔPITAL

Pansements fibres

Exufiber®

Pansement en fibres
à haut pouvoir d'absorption



Code Laboratoire	Dimension totale (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
709912	5 x 10	16	64
709913	10 x 10	16	64
709914	12 x 13	16	64
709915	10 x 20	16	64
709916	20 x 20	10	40
709917	20 x 30	10	40
709918	2,5 x 40	16	64
709919	5 x 40	16	64

Pansements bordés flexibles

Mepilex® Border Post-OP

Pansement siliconé bordé flexible
Usage bloc opératoire



Code Laboratoire	Dimension totale (cm)	Dimension compressée (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
496100	6 x 8	3 x 5	10	80
496200	9 x 10	5 x 6	10	70
496300	10 x 15	5 x 10	10	100
496400	10 x 20	5 x 15	10	120
496450	10 x 25	5 x 20	10	60
496600	10 x 30	5 x 25	10	40
496650	10 x 35	5 x 30	5	55

Pansements bordés flexibles

Mepilex® Border Flex Carré

Pansement hydrocellulaire siliconé bordé flexible,
forme Carrée



Code Laboratoire	Dimension totale (cm)	Dimension compressée (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
595221	7,5 x 8,5	4,5 x 4,5	16	96
595321	10 x 10	6,5 x 6,5	16	96
595000	12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	5	50
595021	14 x 15	10 x 11	16	96
595421	17,5 x 17,5	11 x 11	10	50
595621	17,5 x 23	11 x 16	10	50

Mepilex® Border Flex Oval

Pansement hydrocellulaire siliconé bordé flexible,
forme Ovale



Code Laboratoire	Dimension totale (cm)	Dimension compressée (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
583520	7,5 x 9,5	3,5 x 5,5	16	64
583620	10 x 12,5	6,2 x 8,5	16	64
583320	13,5 x 16,5	9 x 12	16	32
583420	16 x 20	11 x 15,4	10	50

Pansements bordés flexibles

Mepilex® Border Flex EM

Pansement hydrocellulaire siliconé bordé flexible, forme rectangle



Code Laboratoire	Dimension totale (cm)	Dimension compressée (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
581220	5 x 5	3 x 3	10	70
581320	6 x 12	3 x 8	10	50
581520	9 x 15	4,5 x 10	10	70
581820	10 x 20	5 x 15	10	50
595820	10 x 25 Mepilex® Border Flex	5 x 20	10	60
595920	10 x 30 Mepilex® Border Flex	5 x 25	10	40

Mepilex® Border EM

Pansement hydrocellulaire siliconé bordé, forme rectangle



Code Laboratoire	Dimension totale (cm)	Dimension compressée (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
281220	5 x 5	3 x 3	10	70
281900	5 x 10	2,5 x 6,5	10	50
281320	6 x 12	3 x 8	10	70
281520	9 x 15	4,5 x 10	10	50
281800	10 x 20	5 x 15	10	60
281850	10 x 25	5 x 20	10	40
281400	7,5 x 8,5	4,5 x 4,5	10	80
281600	12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	10	80
281700	17,5 x 17,5	11 x 11	10	50

Pansements bordés anatomiques

Mepilex® Border Protect Sacrum

Pansement hydrocellulaire siliconé bordé forme Sacrum



Code Laboratoire	Dimension totale (cm)	Dimension compressée (cm ²)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
282 010	16 x 20	120	10	50
282 440	22 x 25	240	10	30
Arrêt de commercialisation de la taille 20x20 décembre 2021				
282 200	20 x 20	162	10	50

Mepilex® Border Protect Talon

Pansement hydrocellulaire siliconé bordé forme Talon



Code Laboratoire	Dimension totale (cm)	Dimension compressée (cm ²)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
282 720	22 x 23	189	10	30

Pansements non bordés

Mepilex® Transfer

Pansement hydrocellulaire absorbant

Fixation recommandée**



Code Laboratoire	Dimension totale (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
294621	7,5 x 8,5	10	140
294720	12,5 x 12,5	16	128
294920	17,5 x 17,5	10	50

Mepilex® EM

Pansement hydrocellulaire siliconé non bordé, forme mince

Fixation recommandée**



Code Laboratoire	Dimension totale (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
284022	7,5 x 8,5	10	70
284122	12,5 x 12,5	10	50
284322	17,5 x 17,5	10	30

Mepilex® XT

Pansement hydrocellulaire siliconé non bordé avec canaux de drainage

Fixation recommandée**



Code Laboratoire	Dimension totale (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
211110	12,5 x 12,5	5	50
211210	10 x 21	5	45
211310	17,5 x 17,5	5	25
211410	21 x 22	5	20

Pansements non bordés

Mepilex®

Pansement hydrocellulaire siliconé non bordé

Fixation recommandée**




Code Laboratoire	Dimension totale (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
294015	5 x 5	5	40
294100	10 x 10	5	70
294000	12,5 x 12,5	5	50
294201	10 x 21	5	45
294300	15 x 15	5	25
294310	17,5 x 17,5	5	25
294410	21 x 22	5	20

Mepilex® Talon

Pansement hydrocellulaire siliconé non bordé, forme Talon

Fixation recommandée**

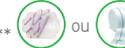

Code Laboratoire	Dimension totale (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
288200	13 x 21	5	25
288320	15 x 22	10	20

Mextra® Superabsorbent

Pansement hydrocellulaire superabsorbant non adhésif

Fixation recommandée**



Code Laboratoire	Dimension totale (cm)	Dimension compressée (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
610700	10 x 10	7 x 7	10	50
610720	10 x 20	7 x 17	10	90
610730	15 x 20	12 x 17	10	40
610750	20 x 30	17 x 27	10	50
610760	20 x 40	17 x 37	10	50

Interfaces

Mepitel® One

Interface transparente siliconée
d'un seul côté

Fixation
recommandée**



Code Laboratoire	Dimension totale (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
289100	5 x 7,5	10	70
289300	7,5 x 10	10	40
289500	10 x 18	10	70
289620	24 x 27,5	5	30

Mepitel®

Interface siliconée des deux côtés

Fixation
recommandée**



Code Laboratoire	Dimension totale (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
290510	5 x 7,5	10	50
290710	7,5 x 10	10	40
291010	10 x 18	10	70
292010	20 x 31	5	30

Fixation/Protection

Tubifast® 2-Way Stretch®

Bandage tubulaire en jersey, extensible
en longueur et en largeur



Code Laboratoire	Code couleur	Circonférence ↔ (cm)	Longueur (m)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
2434	ligne rouge ^{NR}	9-18	10	1	20
2436	ligne verte ^{NR}	14-24	10	1	24
2438	ligne bleue	24-40	10	1	30
2440	ligne jaune	35-64	10	1	12
2444	ligne violette	64-130	10	1	15

Mepitel® Film

Film siliconé transparent semi-perméable



Code Laboratoire	Dimension totale (cm)	Boîte (pcs)	Carton (pcs)
296170	6 x 7	10	50
296270	10 x 12	10	70
296470	10 x 25	10	50
296670	15 x 20	10	70

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation accompagnant les produits.

Exufiber® : Remboursement LPPR, catégorie pansements en fibres à haut pouvoir d'absorption, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies chroniques très exsudatives en phase de détersion. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Mepilex® Border Post Op : Classe IIa - Pansements non remboursés LPPR. Non disponible en ville.

Mepilex® Border Flex, Mepilex® Border Flex Carré, Mepilex® Border Flex Oval : Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires à absorption importante, adhésifs, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës sans distinction de phase et pour les plaies chroniques dès la phase de bourgeonnement, en traitement séquentiel. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Mepilex® Border Flex EM : Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires à absorption moyenne, adhésifs, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës et chroniques faiblement exsudatives dès la phase de bourgeonnement. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Mepilex® Border Protect Sacrum, Mepilex® Border Protect Talon : Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires anatomiques à absorption importante, adhésifs, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës sans distinction de phase et pour les plaies chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel. Non remboursé en prévention des escarres. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Mepilex® Transfer, Mepilex® EM : Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires à absorption moyenne, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës et chroniques faiblement exsudatives dès la phase de bourgeonnement. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Mepilex®, Mepilex® XT : Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires, à absorption importante, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës sans distinction de

phase et pour les plaies chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb. Mepilex® : Non disponible en ville.

Mextra® Superabsorbant : Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires superabsorbants. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës et chroniques très exsudatives, en traitement séquentiel pour les phases de détersion et de bourgeonnement. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Mepitel® One, Mepitel® : Remboursement LPPR, catégorie pansements interfaces, stériles. La prise en charge est assurée pour les peaux fragiles, les plaies aiguës en phase d'épidermisation lors d'un traitement séquentiel ; les plaies chroniques en phase de bourgeonnement ou d'épidermisation lors d'un traitement séquentiel. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Tubifast® 2-Way Stretch® : Catégorie systèmes de maintien non adhésifs, filets et jersey tubulaires, non stériles. La prise en charge est assurée pour le maintien de tout type de pansement sur peau fragile. Prix LPPR = Prix de vente conseillé, sauf lignes rouge et verte : non remboursées. Classe I.

Mepitel® Film : Remboursement LPPR, catégorie systèmes de maintien adhésifs, films adhésifs semi-perméables stériles. La prise en charge est assurée pour : le maintien d'autres pansements utilisés pour les soins des plaies chroniques; en tant que pansement, pour les plaies chroniques et aiguës dans la phase d'épithélialisation de plaies peu ou pas exsudatives; la protection de sites de cathéters intra-veineux; les escarres de l'adulte et du sujet âgé au stade de la rougeur afin de protéger la peau (urines, macération). Prix LPPR = Prix de vente conseillé. Classe IIa.

Mepiform® : Pansements non remboursés LPPR. Non disponible en ville. Classe IIa

Mepilex® Talon : Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires, à absorption importante, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës sans distinction de phase et pour les plaies chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Technologie Flex® :

- 1- Mölnlycke Health Care Conformability test EN13726-4 data on file report no. PD-528870
- 2- Mölnlycke Health Care Competitor testing of UrgoStart Border. data on file report no. 20190510-002
- 3- Mölnlycke Health Care Benchmark testing on UrgoStart Plus. data on file report no. 20191216-003
- 4- Mölnlycke Health Care Analysis of Absofoam Border, FHC at RISE and conformability. data on file report no. 20190228-009
- 5- Mölnlycke Health Care Benchmark of Suprasorb P Sensitive Border. data on file report no. 20191203-005
- 6- Mölnlycke Health Care Competitor benchmark test, Absofoam Border Flex. data on file report no. R-20201203-00007
- 7- Mölnlycke Health Care Tests on competitor product Tegaderm Silicone Foam Border. data on file report no. 20180411-032.
- 8- Mölnlycke Health Care Benchmark testing on Aquacel Foam Pro bordered foam dressings. data on file report no. 20210215-03
- 9- Alten. Comparison of Mepilex® Border Flex dressing and Allewyn Life dressing in wet condition. Report no. PD-529747. Data on file.
- 10- Alten. Comparison of Mepilex® Border Flex dressing and Aquacel foam dressing in wet condition. Report no. PD-534571. Data on file.
- 11- Alten. Comparison of Mepilex® Border Flex dressing and Mepilex® Border dressing in wet condition. Report no. PD-530246. 18 January 2017. Data on file.
- 12- ProDerm study report 16.0180-23. Assessment of Wearing Properties of Wound Dressings on the Elbows. PD-535013.
- 13- ProDerm study report 16.0180-23. Assessment of Wearing Properties of Wound Dressings on the Knees. PD-535012.

Mepilex® Border Post Op :

- 1- Alten. Comparison of Mepilex® Border Flex dressing and Allewyn Life dressing in wet condition. Report no. PD-529747. Data on file.
- 2- Alten. Comparison of Mepilex® Border Flex dressing and Aquacel foam dressing in wet condition. Report no. PD-534571. Data on file

- 3- Alten. Comparison of Mepilex® Border Flex dressing and Mepilex® Border dressing in wet condition. Report no. PD-530246. 18 January 2017. Data on file.
- 4- ProDerm study report 16.0180-23. Assessment of Wearing Properties of Wound Dressings on the Elbows. PD-535013. [Etude réalisée avec Mepilex® Border Flex].
- 5- ProDerm study report 16.0180-23. Assessment of Wearing Properties of Wound Dressings on the Knees. PD-535012. [Etude réalisée avec Mepilex® Border Flex].
- 6- Feili F. et al. Blood Absorption Capacity of Post-operative Wound Dressing. Poster presentation at 5th Congress of the WUWHS, Florence, Italy, 2016.
- 7- Johansson C. et al. Preventing post-operative blisters following hip and knee arthroplasty. Wounds International, 2012 [Etude réalisée avec Mepilex® Border].
- 8- Bredow J. et al. Evaluation of Absorbent Versus Conventional Wound Dressing. A Randomized Controlled Study in Orthopedic Surgery. Dtsch Arztebl Int. 2018; 115(13): 213-219.

Mepilex® Border Flex Carré, Mepilex® Border Flex Oval :

- 1- Mölnlycke Health Care Conformability test EN13726-4 data on file report no. PD-528870.
- 2- Mölnlycke Health Care Competitor testing of UrgoStart Border. data on file report no. 20190510-002.
- 3- Mölnlycke Health Care Benchmark testing on UrgoStart Plus. data on file report no. 20191216-003.
- 4- Mölnlycke Health Care Analysis of Absofoam Border, FHC at RISE and conformability. data on file report no. 20190228-009.
- 5- Mölnlycke Health Care Benchmark of Suprasorb P Sensitive Border. data on file report no. 20191203-005.
- 6- Mölnlycke Health Care Competitor benchmark test, Absofoam Border Flex. data on file report no. R-20201203-00007.
- 7- Mölnlycke Health Care Tests on competitor product Tegaderm Silicone Foam Border. data on file report no. 20180411-032.
- 8- Mölnlycke Health Care Fluid Handling Capacity test EN13726-1:3.3. data on file report no. PD-527642.
- 9- Mölnlycke Health Care Estimation of spreading area using dot pattern on backing film test simulated would model T-1129 data on file report no. PD-528872.
- 10- Mölnlycke Health Care Maintained dressing profile test EN ISO 9073-2, Method A. data on file report no. PD- 525458(1).

Mepilex® Border Flex Carré, Mepilex® Border Flex Oval (suite) :

- 11- Mölnlycke Health Care Spreading layer test on simulated wound model data on file report no. PD-528874
- 12- Boixados D; Allaert FA; Drareni W, Efficacité d'un pansement hydrocellulaire cinq couches avec technologie Flex 360° dans la prise en charge des plaies chroniques et aiguës en pratique infirmière libérale. E-poster EWMA Göteborg 2019.
- 13- Dykes, P.J., Heggie, R. and Hill, S.A. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care, 2001. 10(2):7-10. [réalisé avec Mepilex Border®].
- 14- Waring, M et al. An evaluation of the skin stripping of wound dressing adhesives. J Wound Care, 2011. 20(9) : 412-422. [réalisé avec Mepilex Border®].
- 15- Mölnlycke Health Care Benchmark testing on Aquacel Foam Pro bordered foam dressings. data on file report no. 20210215-03

Technologie Deep Defense et Structure multicouche :

- 1- Santamaria N, Gerdtz M, Sage S, et al. A randomised controlled trial of the effectiveness of soft silicone multi-layered foam dressings in the prevention of sacral and heel pressure ulcers in trauma and critically ill patients: the border trial. Int Wound J 2015;12(3):302-8.
- 2- Kalowes P, Messina V, Li M. Five-layered soft silicone foam dressing to prevent pressure ulcers in the intensive care unit. Am J Critical Care 25(6):e108-e119.
- 3- Santamaria N, Gerdtz M, Kapp S, Wilson L, Gefen A. A randomised controlled trial of the clinical effectiveness of multi-layer silicone foam dressings for the prevention of pressure injuries in high-risk aged care residents: The Border III Trial. Int Wound J. 2018 Jun;15(3):482-490.
- 4- Yoshimura M, Ohura N, Tanaka J, et al. Soft silicone foam dressing is more effective than polyurethane film dressing for preventing intraoperatively acquired pressure ulcers in spinal surgery patients: the Border Operating room Spinal Surgery (BOSS) trial in Japan. Int Wound J. 2018;15(2):188-197.
- 5- Park, K.H., The effect of a silicone border foam dressing for prevention of pressure ulcers and incontinence-associated dermatitis in intensive care unit patients. J Wound Ostomy Continence Nurs, 2014. 41(5): p. 424-9.

- 6- Brindle CT, Wegelin JA. Prophylactic dressing application to reduce pressure ulcer formation in cardiac surgery patients. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2012 ;39:133-42..
- 7- Chaiken N. Reduction of sacral pressure ulcers in the intensive care unit using a silicone border foam dressing. J Wound Ostomy Continence Nurs 2012;39:143-5.
- 8- Cubit K, McNally B, Lopez V. Taking the pressure off in the Emergency Department: evaluation of the prophylactic application of a low shear, soft silicon sacral dressing on high risk medical patients. Int Wound J 2013;10(5):579-84.
- 9- Santamaria N, Gerdtz M, Liu W et al. Clinical effectiveness of a silicone foam dressing for the prevention of heel pressure ulcers in critically ill patients: Border II Trial. J Wound Care. 2015 Aug;24(8):340-5.
- 10- Hahnel, E., El Genedy, M., Tomova-Simitchieva, T., Hauß, A., Stroux, A., Lechner, A., Richter, C., Akdeniz, D. M., Blume-Peytavi, U., Löber, N. and Kottner, J. The effectiveness of two silicone dressings for sacral and heel pressure ulcer prevention compared with no dressings in high-risk intensive care unit patients: a randomized controlled parallel-group trial, British Journal of Dermatology, 2019.
- 11- FE simulation of PUP with different protection dressings on protecting soft tissues from high stresses and deformation, Mölnlycke Health Care, Data on File 2019
- 12- Schwartz, D. Gefen, A. The biomechanical protective effects of a treatment dressing on the soft tissues surrounding a non-flooded sacral pressure ulcer. International Wound Journal. 2019 Jun;16(3):684-695

Mepilex® Border Flex EM :

- 1- Alten. Comparison of Mepilex® Border Flex dressing and Allevyn Life dressing in wet condition. Report no. PD-529747. Data on file.
- 2- Alten. Comparison of Mepilex® Border Flex dressing and Aquacel foam dressing in wet condition. Report no. PD-534571. Data on file.
- 3- Alten. Comparison of Mepilex® Border Flex dressing and Mepilex® Border dressing in wet condition. Report no. PD-530246. 18 January 2017. Data on file.
- 4- ProDerm study report 16.0180-23. Assessment of Wearing Properties of Wound Dressings on the Elbows. PD-535013. [Etude réalisée avec Mepilex® Border Flex].
- 5- ProDerm study report 16.0180-23. Assessment of Wearing Properties of Wound Dressings on the Knees. PD-535012. [Etude réalisée avec Mepilex® Border Flex].
- 6- Dykes, P.J., Heggie, R. and Hill, S.A. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care, 2001. 10(2): 7-10. (réalisé avec Mepilex Border®).
- 7- Waring, M et al. An evaluation of the skin stripping of wound dressing adhesives. J Wound Care, 2011. 20(9) : 412-422. (réalisé avec Mepilex Border®).
- 8- Boixados D; Allaert FA; Drareni W, Efficacité d'un pansement hydrocellulaire cinq couches avec technologie Flex 360° dans la prise en charge des plaies chroniques et aiguës en pratique infirmière libérale. E-poster EWMA Göteborg 2019.

Mepilex® EM :

- 1- Diggelmann KV, Zytkovicz AE, Tuaine JM et al. Br J Radiol. 2010;83(995):971-8.
- 2- Paterson DB, Poonam P, Bennett NC et al. J Cancer Sci Ther. 2012; 4(11):347-356.
- 3- Boesch RP, Myers C, Garrett T et al. Pediatrics. 2012;129: e792-e797.
- 4- Cohen LP, Ovadia-Blechman Z, Hoffer O, Gefen A. Int Wound J. 2019; 1-14.

Mepilex® XT :

- 1- Lantin A., Diegel C., Scheske J. et al. Wounds Internat 2015 ; 6 (4) : 18-22.
- 2- SMTL TM-404 Free Swell Absorption Capacity report 20130123-006.
- 3- STML BS EN-13726-1:2002(E) 3.3 : Fluid Handling Capacity (Low and High viscosity).

Mepitel® One :

- 1- David F, Wurtz J-L, Breton N, et al. Int Wound J. 2018;15:159-169.

Mepitel® :

- 1- Lurton Y, Le Berre M. JPC, 2007 ; 12(61) : 15-23.

Mepitel® Film :

- 1- Herst P.M., et al., Radiother Oncol, 2014. 110(1): p.137-43.

Mölnlycke Health Care, Exufiber, Mepilex, Mepitel, Tubifast 2-Way Stretch, Mextra, Mepiform et Safetac sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales.

Tous les produits mentionnés sont fabriqués en Europe excepté Mextra Superabsorbant. Dispositifs médicaux CE 2797.

L'organisme notifié pour l'ensemble de ces produits est BSI (British Standards Institution). Toutes les allégations cliniques des produits présentés proviennent de la notice d'utilisation et du dossier technique de marquage CE.

LÉGENDE DES DIFFÉRENTS PICTOGRAMMES :















Niveaux d'absorption des exsudats.
 Lavable.
 Autorise la douche.
 Ajustable découpable.
 Fixation recommandée : Mepitel® Film
 Fixation recommandée : Tubifast® 2-Way Stretch®
 Fixation recommandée : Mepitel® Film ou Tubifast® 2-Way Stretch®


 Pansements inscrits sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) par la Sécurité Sociale, sauf Tubifast® 2-Way Stretch® (lignes rouge et verte).

Recommandations en fonction des niveaux d'exsudats :

-  Mepitel® Film, Mepitel®, Mepitel® One, Mepiform® et Tubifast® 2-Way Stretch®
-  Mepilex® E.M., Mepilex® Border E.M., Mepilex® Border Flex E.M et Mepilex® Transfer
-  Mepilex® XT et Mepilex® Talon
-  Exufiber®, Mepilex® Border Flex Mepilex® Border Flex carré, Mepilex® Border Protect Sacrum, Mepilex® Border Protect Talon et Mepilex® Border Flex Oval
-  Mextra® Superabsorbant

MÖNLÿCKE COACH CONSEIL

L'assistance téléphonique dédiée aux IDEs libérales pour répondre à une problématique de plaies

Contactez votre IDE référent Nord au **06 33 09 67 53**

Contactez votre IDE référente Sud au **06 33 09 02 47**

Les données recueillies par Mölnlycke au cours de nos visites commerciales ou via l'assistance téléphonique sont traitées par Mölnlycke afin d'identifier et d'assurer un suivi des problématiques rencontrées, et de maintenir nos relations commerciales. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits, vous pouvez consulter la politique de confidentialité sur le site [Molnlycke.fr](https://www.molnlycke.fr)

Politique de confidentialité <https://www.molnlycke.fr/a-propos-du-site/policies/>

Besoin d'informations sur un produit, de documents, ou d'échanger avec votre délégué ?

Contactez votre délégué ou le service clients au

03.20.12.25.55



RESTEZ
CONNECTÉ
AVEC MÖNLÿCKE



Mölnlycke®

Distributeur : Mölnlycke Health Care

CS 70205 - 13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex

Fabricant : Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden

Tél : +46 31 722 30 00 - Fax : +46 31 722 34 01

Service clients & Renseignements produits Ville: Tel : 03 20 12 25 55 - Fax : 03 20 12 25 46

Service clients Hôpital: Tel : 08000 915 188 - Fax : 0800 915 073

Réclamation qualité produits : reclamation.qualite@molnlycke.com

www.molnlycke.fr