

BARRIER®

Trousse d'isolation verticale



- Poche de recueil pour une gestion efficace des liquides
- Poches à instruments intégrées pour une gestion efficace des instruments
- Film à inciser transparent et extensible intégré pour une fixation sécurisée
- Drapage monobloc, facile à mettre en place
- Imperméable pour empêcher les fuites et aider à protéger le patient contre les infections



1. Orientez le champ dans le sens du pictogramme.



2. Retirez la bande de protection en vous faisant aider par une ou deux personnes. Observez le sens de la flèche.



3. Placez le film à inciser sur le patient.



4. Dépliez le champ de haut en bas, puis de gauche à droite.



5. Fixez le bord adhésif sur le cadre à l'arrière du champ.



6. Ouvrez la poche de recueil et connectez le tuyau d'aspiration à l'orifice d'évacuation si nécessaire.

N°. Réf.	Codes stériles	Taille (cm)	Taille de la zone absorbante (cm)	Condit. int. / Condit. ext.
903016	Trousse d'isolation verticale : 1 Housse de Mayo renforcée 4 Serviettes absorbantes 1 Champ d'isolation verticale, film à inciser 40 × 30 cm 1 Champ de table renforcé	79 × 145 18 × 25 330 × 240 150 × 190	65 × 85 75 × 190	6 / 12
903026	Trousse d'isolation verticale : 1 Housse de Mayo renforcée 4 Serviettes absorbantes 1 Champ d'isolation verticale, film à inciser 86 × 25 cm 1 Champ de table renforcé	79 × 145 18 × 25 330 × 240 150 × 190	65 × 85 75 × 190	4 / 8
903014	Trousse d'isolation verticale : 4 Serviettes absorbantes 1 Champ d'isolation verticale, film à inciser 40 × 30 cm 1 Champ de table renforcé	18 × 25 330 × 240 150 × 190	75 × 190	7 / 14
826010	Champ d'isolation verticale, film à inciser 86 × 25 cm	330 × 240		7 / 14
826020	Champ d'isolation verticale, film à inciser 40 × 30 cm	330 × 240		10 / 20
80000527	Champ d'isolation verticale, film à inciser 60 × 30 cm	320 × 240		10 / 20

Le contenu de toutes les trousse stériles est également disponible dans les trousse sur mesure Mölnlycke®.

N°. Réf.	Composants des trousse sur mesure Mölnlycke®	Taille (cm)
815300	Champ d'isolation verticale, film à inciser 86 × 25 cm	330 × 240
815301	Champ d'isolation verticale, film à inciser 40 × 30 cm	330 × 240
80008032	Champ d'isolation verticale, film à inciser 60 × 30 cm	320 × 240

Trouvez plus d'informations sur www.molnlycke.fr

Mölnlycke et BARRIER sont des marques et logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. Pour l'ensemble des produits BARRIER, l'organisme notifié est le British Standards Institution (BSI).
Organisme notifié 2797.

Distributeur : Mölnlycke Health Care CS 70205 - 13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex

Service clients : Tél.: 0800 915 188 - Email : csc.fr@molnlycke.com

Renseignements produits : Tél.: 03 20 12 25 55

Réclamations qualité : reclamation.qualite@molnlycke.com

Fabricant : Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden - Tél.: +46 31 722 30 00 - Fax : +46 31 722 34 01

© Copyright (2020) Mölnlycke Health Care. FRSU01872004