

Résultats Evaluations Gammes Mepilex® Border

10 Février 2021



Préambule

Le Laboratoire Mölnlycke Health Care tient à remercier l'ensemble des soignants ayant participé à ces évaluations dans le cadre de leurs pratiques quotidiennes.

Nous tenons à votre disposition toutes informations complémentaires liées aux fiches reçues ayant permis de réaliser ces analyses.

Chiffres clés

- **210** fiches collectées sur la période d'Octobre 2020 à Janvier 2021 (\pm 12 semaines)
- Au total, **77** professionnels de santé ont participé volontairement à cette évaluation
- **100%** des fiches ont pu être exploitées pour réaliser les analyses descriptives
- Evaluation des **4** pansements dans la pratique quotidienne hospitalière des soignants :
 - Mepilex Border Flex Carré et Oval / Mepilex Border Flex EM
 - Mepilex Border Protect Sacrum / Mepilex Border Protect Talon
- **12** Hôpitaux de l'AP-HP ont participé
- **11** spécialités médicales (chirurgie & consultations)

Traitement des données & résultats

1. Plan d'analyse statistique en amont

- Format des résultats & croisement de données
- Revue des données :
 - traitement des données manquantes
 - traitement des données incohérentes ou inexploitable

2. Rapport d'analyse statistique

- Résultats globaux & par type de plaie (aigues/chroniques)


Evaluateurs & Spécialités (n=75)

- **97.3%** Infirmiers
- 2.7% Médecins
- 53.7% des professionnels de santé en activité en service de chirurgie
- Répartition par spécialité
 - 24.3% Chirurgie digestive et viscérale
 - 14.7% Chirurgie orthopédique
 - 13.3% Dermatologie
 - 10.7% Gériatrie
 - 9.4% Consultation/chirurgie plastique
 - 9.3% Consultation orthopédie
 - 5.3% Médecine Interne
 - 5.3% Médecine vasculaire
 - 5.3% Chirurgie gynécologique
 - 4% Chirurgie générale
 - 2.7% Neurochirurgie

Les évaluations ont globalement été réalisées par le corps infirmier dans diverses spécialités de médecine et chirurgies.

REPRÉSENTATIVITÉ DES EVALUATIONS SUR LES HÔPITAUX DE L'AP-HP

■ Nombre d'évaluateurs par Hopital (n=76) ■ Nombre d'évaluations par Hopital (n=210)

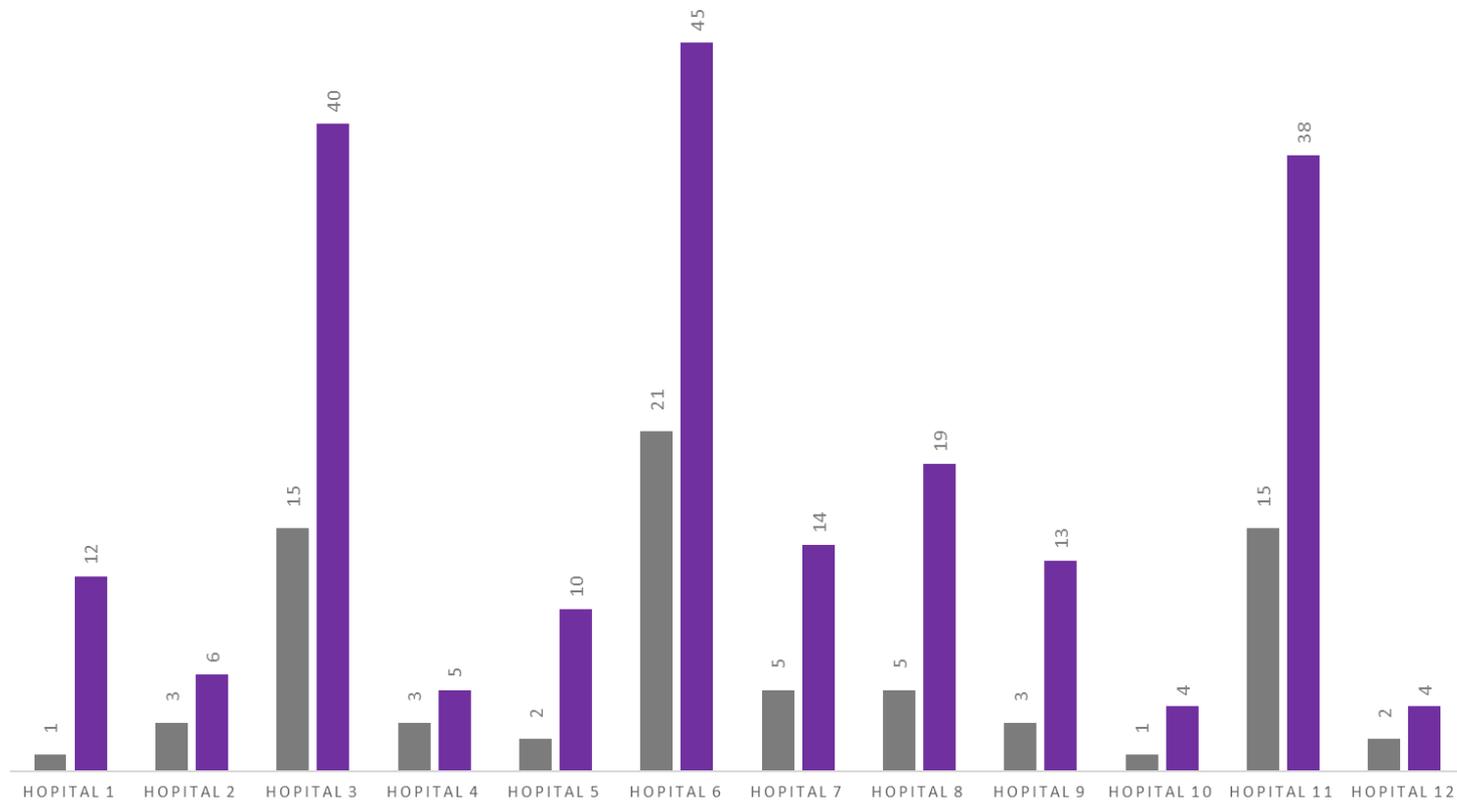

En moyenne, 3 fiches complétées par soignant

Type de plaies prises en charge (n=203)

Type de plaies non renseigné dans 3.3% des cas soit données manquantes n =7

- **71.9%** plaies aiguës (n=146)

- **67.1%** Plaie post-opératoire
- 11.7% Plaie traumatique
- 6.8% Lésion liée à la maladie de Verneuil
- 4.8 % Autres (plaies difficiles à classer)
- 4.1% Greffe
- 3.4% Epidermolyse bulleuse
- 2.1 %Prévention des escarres

- **28.1%** plaies chroniques (n=57)

- **93.0%** Escarre
- 5.3% Ulcère de jambe
- 1.7% Ulcère du pied diabétique


Dans plus de 2 cas sur 3, l'évaluation a été réalisée sur une plaie aiguë

Localisations des plaies aiguës (n=146)


• Principales localisations

- Abdomen : 22.6%
- Sein : 15.7%
- Membres inférieurs : 16.4%
- Membres supérieurs : 13.0%

Pansements utilisés pour tous types de localisation grâce à leurs dimensions adaptées, conformabilité et tenue en place

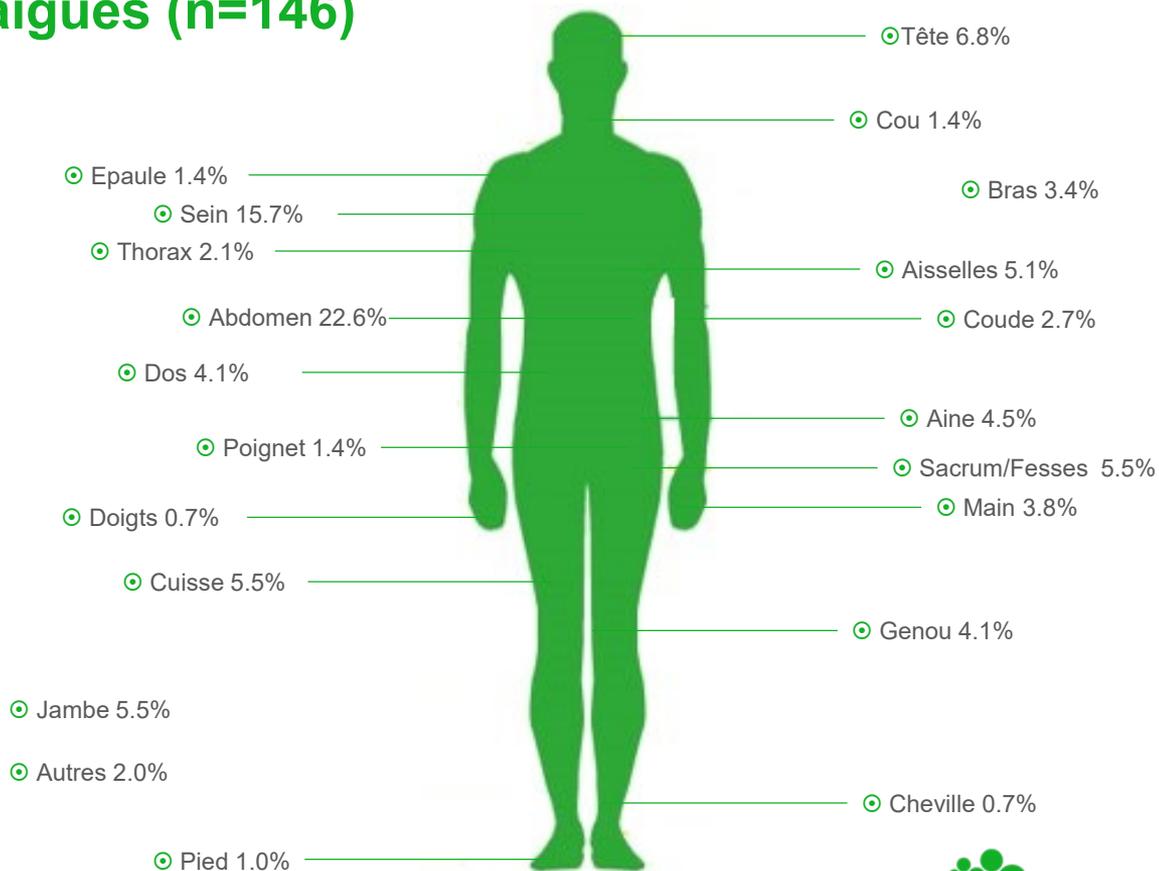

Répartition de l'utilisation des pansements par gamme

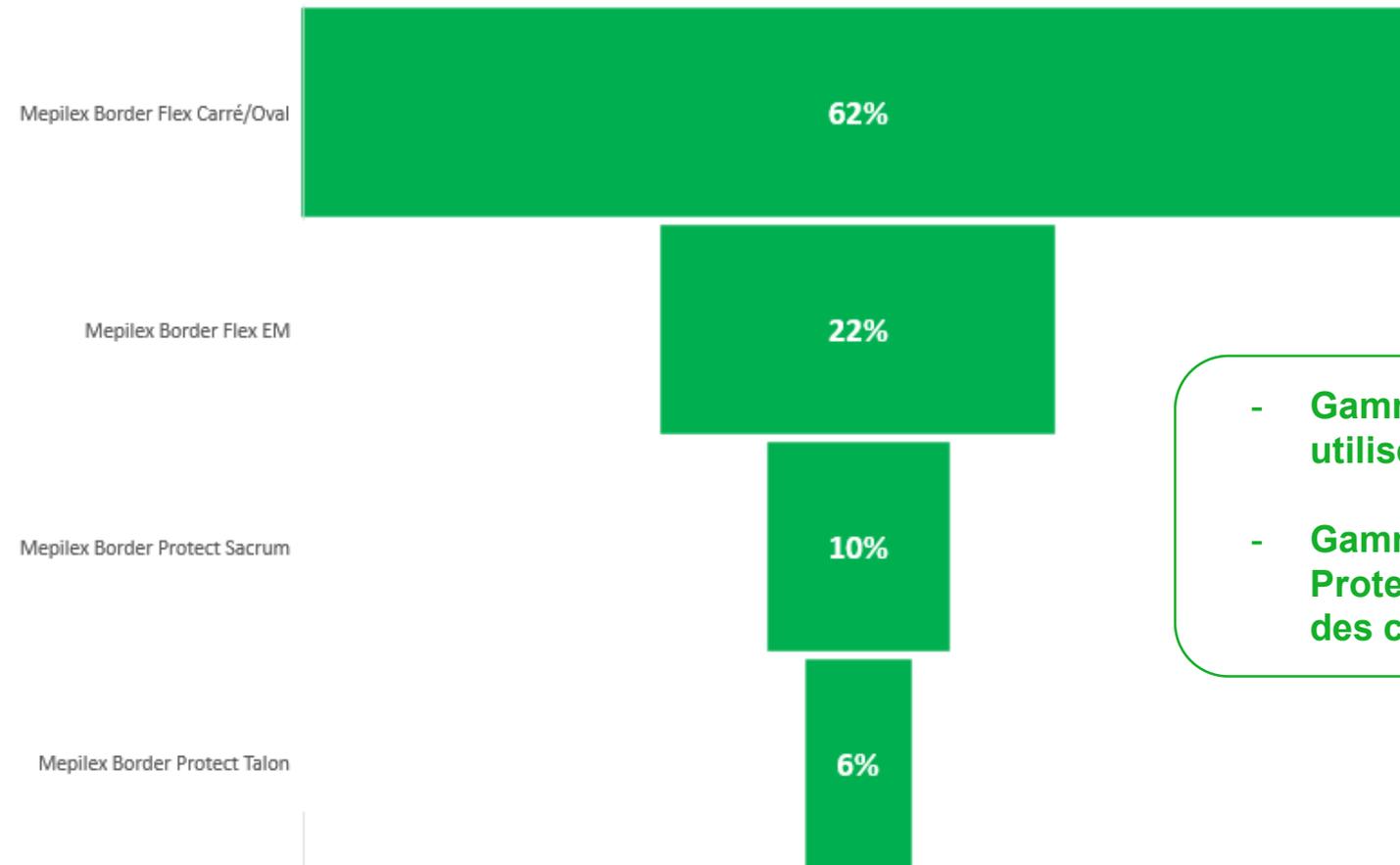

- **Gamme Mepilex Border Flex utilisée dans 84 % des cas**
- **Gamme Mepilex Border Protect utilisée dans 16% des cas**

Répartition des pansements utilisés selon le type de plaie (n=203)

- **Plaies aiguës** (n=146)

- Mepilex Border Flex Carré ou Oval : **68.5%**
(65% des utilisations pour des plaies post op)
- Mepilex Border Flex EM : 29.4%
(76.7% des utilisations pour des plaies post op)
- Mepilex Border Protect Sacrum : 2.1%*


- **Plaies chroniques** (n=57)

- Mepilex Border Flex Carré ou Oval : **45.6 %**
- Mepilex Border Flex EM : 3.5%
- Mepilex Border Protect Sacrum : 29.8%
- Mepilex Border Protect Talon : 21.1%

Toutes Plaies aiguës et chroniques confondues :
Répartition Gamme Flex : Epaisseur standard 62.1% et Formes Minces 22.2%


PERFORMANCES TECHNIQUES - Toutes plaies confondues (n=203)

■ Réponses cumulées "Très Satisfaisant" et "Satisfaisant" toutes plaies confondues

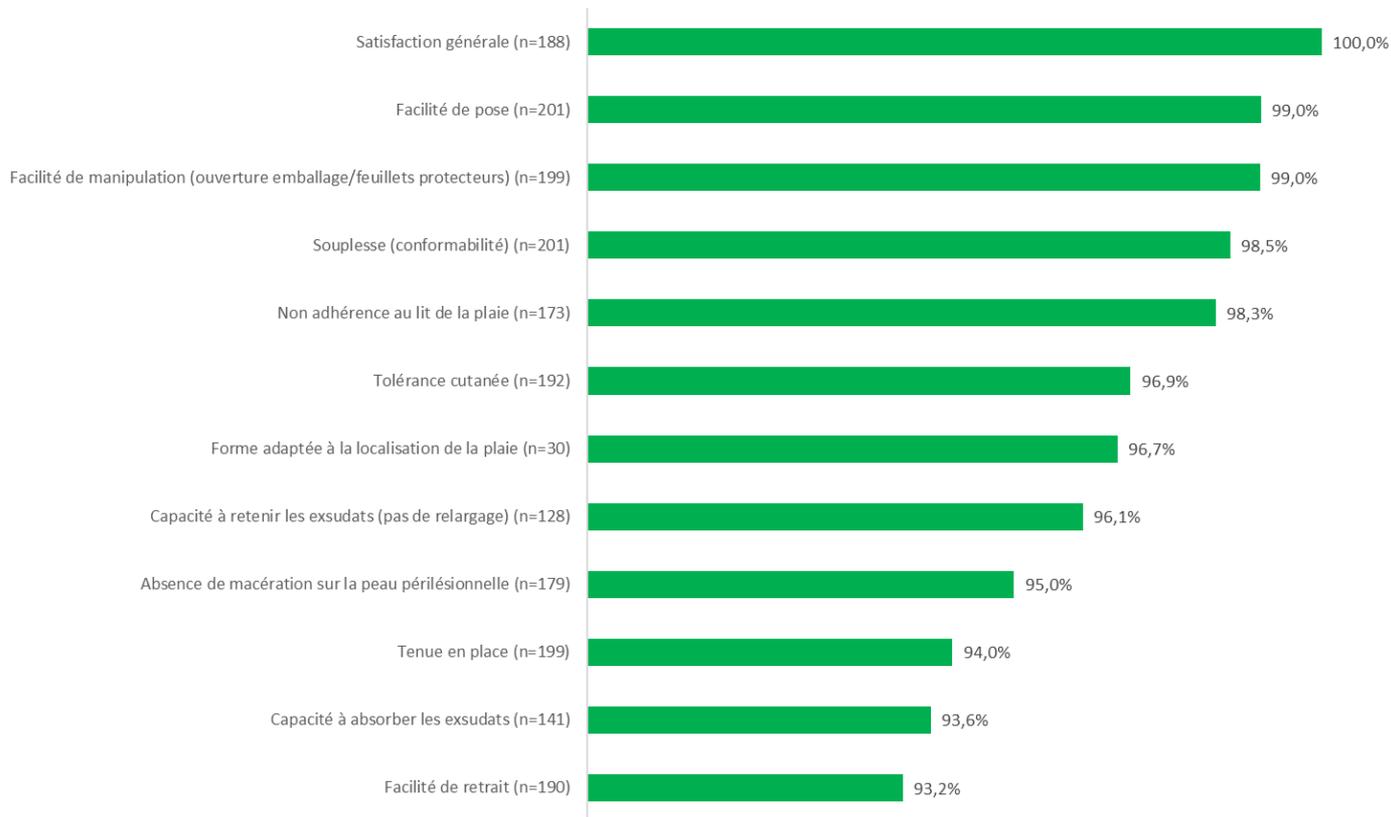

- Pour l'ensemble des caractéristiques techniques : Taux de satisfaction compris entre 93.2% et 99.0%
- Taux de satisfaction générale 100% pour les Gammes Mepilex Border Flex et Mepilex Border Protect

Performance technique - Toutes Plaies aiguës (n=146)

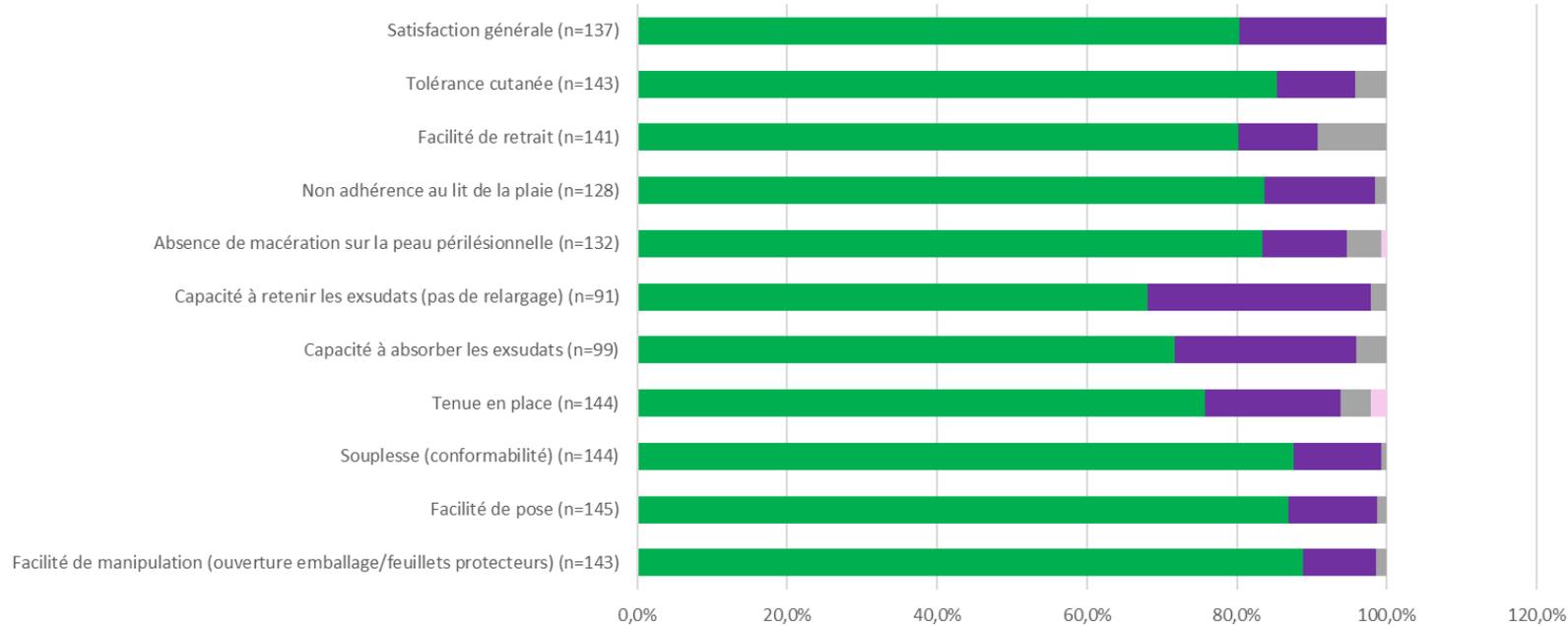

	Facilité de manipulation (ouverture emballage/feuillet protecteurs) (n=143)	Facilité de pose (n=145)	Souplesse (conformabilité) (n=144)	Tenue en place (n=144)	Capacité à absorber les exsudats (n=99)	Capacité à retenir les exsudats (pas de relargage) (n=91)	Absence de macération sur la peau périlésionnelle (n=132)	Non adhérence au lit de la plaie (n=128)	Facilité de retrait (n=141)	Tolérance cutanée (n=143)	Satisfaction générale (n=137)
■ Très satisfaisant	88,8%	86,9%	87,5%	75,7%	71,7%	68,1%	83,3%	83,6%	80,1%	85,3%	80,3%
■ Satisfaisant	9,8%	11,7%	11,8%	18,1%	24,2%	29,7%	11,4%	14,8%	10,6%	10,5%	19,7%
■ Assez satisfaisant	1,4%	1,4%	0,7%	4,2%	4,0%	2,2%	4,5%	1,6%	9,2%	4,2%	0,0%
■ Non satisfaisant	0,0%	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Performance technique - Toutes Plaies Chroniques (n=57)



	Facilité de manipulation (ouverture emballage/feuilles protecteurs) (n=56)	Facilité de pose (n=56)	Souplesse (conformabilité) (n=56)	Tenue en place (n=55)	Capacité à absorber les exsudats (n=42)	Capacité à retenir les exsudats (pas de relargage) (n=37)	Absence de macération sur la peau périlésionnelle (n=47)	Non adhérence au lit de la plaie (n=45)	Facilité de retrait (n=49)	Tolérance cutanée (n=49)	Satisfaction générale (n=51)
■ Très satisfaisant	85,7%	83,9%	92,9%	80,0%	54,8%	51,4%	66,0%	88,9%	87,8%	91,8%	78,4%
■ Satisfaisant	14,3%	16,1%	5,4%	14,5%	33,3%	40,5%	29,8%	8,9%	12,2%	8,2%	21,6%
■ Assez satisfaisant	0,0%	0,0%	1,8%	3,6%	11,9%	8,1%	4,3%	2,2%	0,0%	0,0%	0,0%
■ Non satisfaisant	0,0%	0,0%	0,0%	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Conclusion

- Mepilex[®] Border Flex Carré, Oval et EM sont utilisés pour **tous types de plaies** aiguës ou chroniques et **quelle que soit la zone anatomique** (*planes ou non planes/articulations*).
- Mepilex Border Protect Sacrum et Talon sont utilisés **en traitement et en prévention des escarres**
- Mepilex[®] Border Flex Carré, Oval, EM et Mepilex Border Protect Sacrum& Talon **répondent aux attentes cliniques des soignants**.
- Mepilex[®] Border Flex Carré, Oval, EM et Mepilex Border Protect Sacrum& Talon sont **appréciés par les soignants** pour l'ensemble de leurs caractéristiques techniques et **en particulier pour leur facilité de pose, leur manipulation et leur souplesse** (*conformabilité*).